


mamivac®

 MAMILLOMETER

Finde die richtige Stillhütchen-Größe

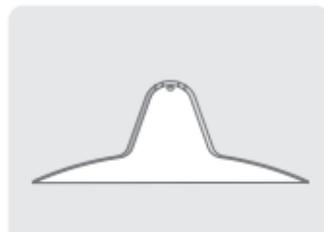


Konisch

S = 18 mm

M = 20 mm

L = 28 mm

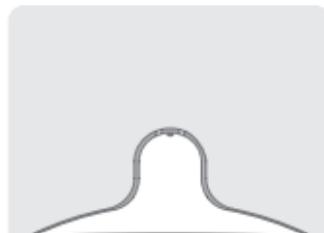


Kirschförmig


S = 18 mm

M = 22 mm


L = 28 mm

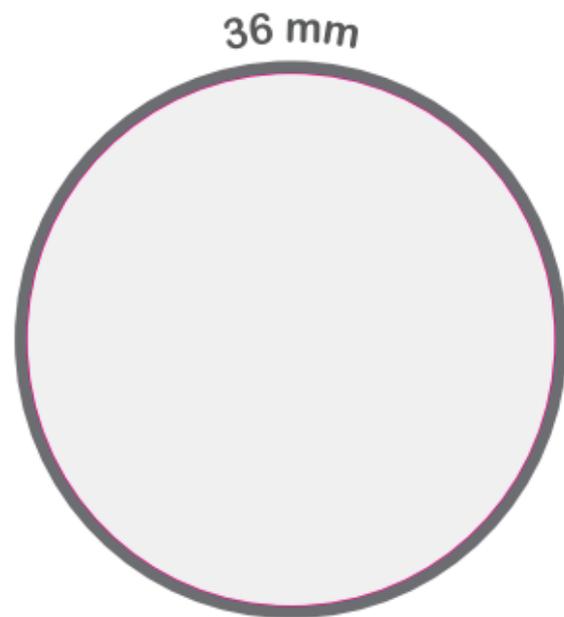


36 mm

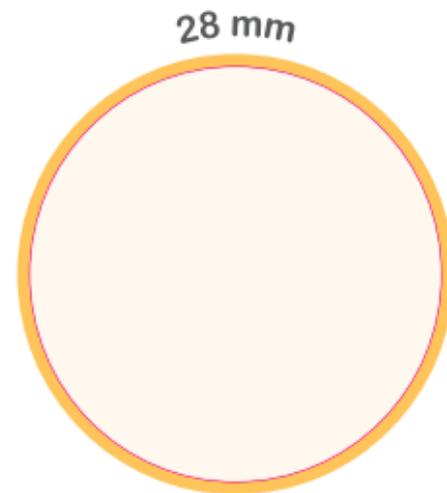


28 mm

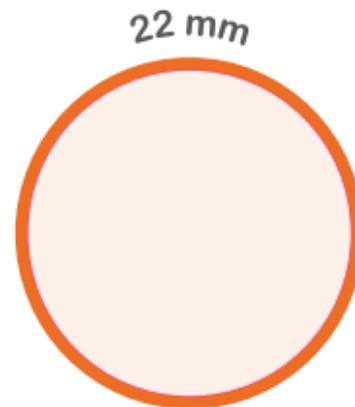

22 mm

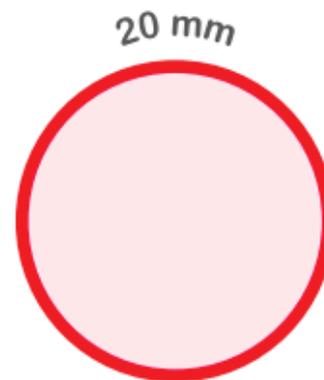


20 mm

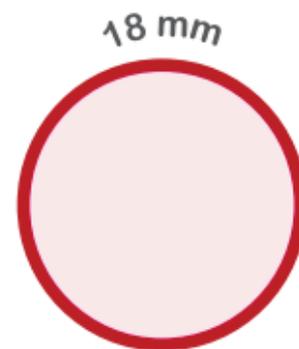

18 mm




Wie findet man die richtige Größe?

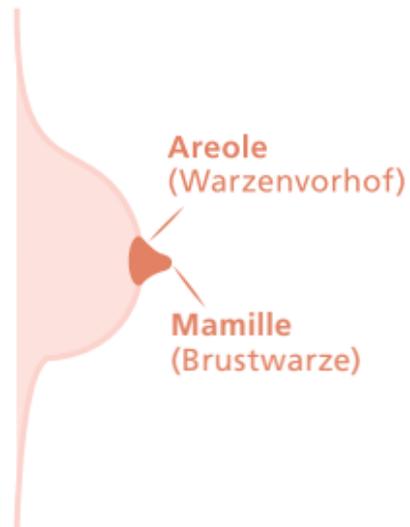

Legen Sie die verschiedenen Stanzgrößen über Ihre Brustwarze und prüfen Sie, welche Größe Sie benötigen.

- Die Größe des Stillhütchens richtet sich nach der Mamille und nicht nach der Areole.
- Führen Sie die Messung in entspannter Atmosphäre durch.
Die Brustwarze sollte ringsum etwa 2 mm Spielraum haben, dann haben Sie das richtige Stillhütchen.
- Bei Unklarheiten hilft Ihnen gerne Ihre Stillberaterin weiter.

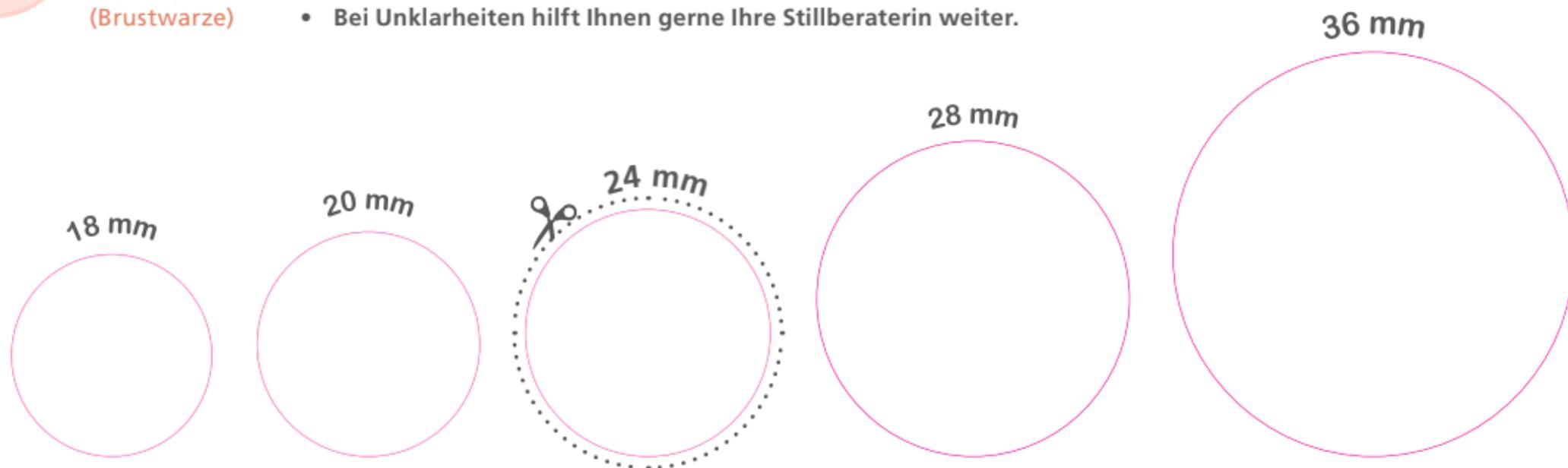

Unsere Brustglocken- und Pumpsetgrößen

